

# Articare® Cold Pack Instant

Bolsa de frío instantáneo de un solo uso, para el alivio inmediato del dolor en traumatismos y lesiones menores



**SIN  
LÁTEX**  
EN LA FÓRMULA

## Características y beneficios

- Activación mediante presión manual; no necesita una nevera como soporte.
- Efecto superior a 30 minutos; buena relación coste-eficacia.
- Crioterapia; genera un ciclo de vasodilatación-vasoconstricción; reducción de la conducción nerviosa del dolor; disminución del metabolismo local, limitando el riesgo de agravamiento de las lesiones musculares; reducción del edema y disminución de la rigidez muscular.
- No contiene látex, especialmente indicado en pacientes con alergia al látex y derivados.


## Indicaciones

- Para el alivio rápido de los efectos inflamatorios como el edema y dolor producido por traumatismo articular y lesiones en tejidos blandos.
- Para todo tipo de actividades deportivas susceptibles de producir una lesión con dolor agudo (p. ej. contusiones y esguinces).

## Instrucciones de uso

1. Sacudir la bolsa para hacer bajar el producto.
2. Presionar fuertemente el centro de la misma.
3. Agitar a fin de activar la reacción criogénica.

## Presentación

C.N.	Medidas	Ud. mínima de venta	Código Smith & Nephew	
206900.8	15 cm x 24 cm	24	47423-00000-02	

División BSN Medical  
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2 y 4  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona (España)

Tel.: 902 303 166  
Fax: 902 303 170  
www.smith-nephew.com

 smith&nephew