

# Articare® Cold Spray

Spray de frío para el alivio inmediato del dolor en traumatismos y lesiones



**SIN  
LÁTEX**  
EN LA FÓRMULA

## Características y beneficios

- Efecto inmediato; rápida evaporación con pérdida de calor local y alivio del dolor.
- No contiene derivados del éter; previene el riesgo de irritaciones cutáneas.
- Presentación en spray; rápido y fácil de aplicar.
- Envase metálico; seguridad en el transporte.
- No contiene CFC; ecológico.

## Indicaciones

- Para el alivio rápido de los efectos inflamatorios como el edema y dolor producido por traumatismo articular y lesiones en tejidos blandos.


- Para todo tipo de actividades deportivas susceptibles de producir una lesión con dolor agudo (p. ej. contusiones y esguinces).

## Instrucciones de uso

- Para evitar congelaciones, debe aplicarse en pulveraciones cortas y a una distancia de aproximadamente 15 cm.

El efecto de Articare Cold Spray, si bien es de gran eficacia e inmediato, es de corta duración, por lo que posteriormente debe emplearse un tratamiento local de crioterapia (como bolsas de frío o aplicar hielo), así como un vendaje compresivo.

## Presentación

C.N.	Capacidad	Ud. mínima de venta	Código Smith & Nephew	
206901.5	200 ml	2	47422-00000-01	

**División BSN Medical**  
Smith & Nephew, S.A.  
Fructuós Gelabert, 2 y 4  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona (España)

Tel.: 902 303 166  
Fax: 902 303 170  
www.smith-nephew.com

 **smith&nephew**

Articare® Cold Spray